



Esta guía describe el cuidado, uso correcto y mantenimiento de su máscara de protección facial personalizada fabricada por Digital Strings®. Seguir estas indicaciones asegura la funcionalidad protectora, la higiene y la durabilidad del dispositivo.

Material (shell)	Sujeción	Acolchonado
Resina eSUN Hard-Tough UV	Correas elásticas + hebillas plásticas	Micropore a prueba de agua

1. LIMPIEZA

- Limpiar la máscara con un paño húmedo con agua tibia después de cada uso.
- Para desinfectar: paño con alcohol isopropílico al 70%. Dejar secar al aire libre.
- No sumergir en agua ni lavar en lavaplatos.
- Evitar solventes agresivos: acetona, thinner, blanqueador o limpiadores abrasivos — dañan la resina.
- No exponer a calor directo para secar (secador de pelo, sol intenso directo, horno). Secar siempre a temperatura ambiente.

2. ALMACENAMIENTO

- Guardar en un estuche o bolsa protectora cuando no esté en uso.
- Almacenar en lugar seco, a temperatura ambiente (no superar 50 °C).
- No colocar objetos pesados encima de la máscara.
- Evitar superficies que puedan rayar el acabado.

Nota sobre exposición solar

Usar la máscara durante el deporte bajo el sol es completamente seguro: el material soporta la exposición dinámica al sol durante el juego sin degradarse.

El riesgo real es dejarla abandonada al sol sin usarla por períodos prolongados (ej. en el banco de suplentes, sobre el tablero del auto, en el campo sin atención). La exposición estática e intensa puede afectar el material con el tiempo.

Recomendación: cuando no esté en uso durante el juego, guardarla en la bolsa o dejarla bajo sombra.

3. USO EN CAMPO

- Verificar que las correas estén bien ajustadas y las hebillas aseguradas antes de ingresar al campo.
- La máscara está diseñada para uso deportivo de contacto. El ajuste debe ser firme pero sin comprimir tejidos ni generar dolor.
- En caso de impacto fuerte, retirar la máscara e inspeccionar visualmente antes de continuar el juego.
- No modificar la máscara: no perforar, lijar, pintar ni alterar su estructura sin aprobación de Digital Strings®.
- Si el atleta siente incomodidad, cambio en el ajuste o dolor, suspender el uso y contactar a Digital Strings® o al médico tratante.

4. CORREAS Y HEBILLAS

- Revisar el estado de las correas antes de cada sesión: buscar desgaste, cortes o pérdida de elasticidad.
- Limpiar las correas con agua y jabón suave. Enjuagar bien y dejar secar al aire.
- Las hebillas plásticas son reemplazables. Contactar a Digital Strings® si presentan deformación, fractura o pérdida de sujeción.
- El ajuste correcto: hebilla bien cerrada, correa firme pero sin marcar la piel ni restringir la circulación.
- No tensar en exceso las correas para compensar un ajuste incorrecto del shell — en ese caso, contactar a Digital Strings®.

5. ACOLCHONADO (MICROPORE)

- El acolchonado de Micropore a prueba de agua está en contacto directo con la piel: mantener higiene estricta.
- Limpiar entre reemplazos con paño húmedo suave. No saturar de líquido.
- Reemplazar el Micropore cuando observe desgaste visible, suciedad persistente, pérdida de adhesión o irritación de piel.
- Los reemplazos están disponibles a través de Digital Strings®. No sustituir por materiales no aprobados.

6. VIDA ÚTIL

- La resina eSUN Hard-Tough UV tiene alta resistencia al impacto y durabilidad estructural.
- Vida útil estimada: 12 a 18 meses con uso y cuidado adecuados.
- Inspeccionar visualmente después de impactos: buscar grietas, fisuras o deformaciones en el shell.
- El desgaste estético (rasguños superficiales, cambios de color leves) no compromete la funcionalidad protectora.
- Si se detecta daño estructural, suspender el uso de inmediato y contactar a Digital Strings® para evaluación.

7. NOTA CLÍNICA

Esta máscara es un **dispositivo de protección facial**, no un dispositivo de inmovilización. Su uso en competencia o entrenamiento debe estar explícitamente autorizado por el médico tratante del atleta.

- No reemplaza el tratamiento médico indicado para la lesión de base.
- Cualquier ajuste, modificación o reemplazo de componentes debe coordinarse con Digital Strings®.
- En caso de dolor persistente, cambio en el ajuste o nueva lesión facial, suspender el uso y consultar al médico.
- La máscara fue fabricada a medida según la anatomía del paciente: no debe ser usada por otra persona.

8. CONTACTO Y SOPORTE

Para consultas sobre cuidado, reemplazos de componentes, ajuste o garantía:

Email: info@digistrings.com

Web: <https://digistrings.com>

Agendar asesoría: <https://calendly.com/diggroupgt/workshop-gratuito>

Dirección: Edificio Narama, Local 121, 14 Avenida 16-14, Zona 13, Ciudad de Guatemala

Horario: 9:00 – 18:00 GT · Respuesta en menos de 24 horas hábiles



